



Die mylife CamAPS FX App auf Ihrem iPhone

iOS-spezifische Informationen und Anleitungen

Das automatisierte Insulinabgabe-System (AID) mylife Loop, bestehend aus der mylife CamAPS FX App, der mylife YpsoPump Insulinpumpe und einem Sensor zur kontinuierlichen Glukosemessung (CGM) nach Wahl, ist jetzt für das iPhone verfügbar! Wie gewohnt, stehen die CGM-Sensoren FreeStyle Libre 3, FreeStyle Libre 3 Plus* und Dexcom G6 zur Verfügung.

Das Smartphone-basierte Therapiemanagement ist die Zukunft der Diabetesbehandlung. Deshalb erweitern wir die Wahlfreiheit, denn Menschen mit Typ-1-Diabetes können zur Nutzung der mylife CamAPS FX App nun zwischen den Betriebssystemen iOS und Android wählen. War die App bisher nur für Android-Smartphones verfügbar, ist sie jetzt auch für iPhone-Benutzer zugänglich und eröffnet damit noch mehr Menschen die Möglichkeit, von dieser Technologie zu profitieren.



So laden Sie die iOS-Version der mylife CamAPS FX App herunter

Laden Sie die mylife CamAPS FX App (mg/dL oder mmol/L) aus dem Apple App Store auf Ihr iPhone herunter. Verwenden Sie die QR-Codes, um die App direkt herunterzuladen. Es wird empfohlen, automatische Updates im Apple Store zu deaktivieren, damit die mylife CamAPS FX App jederzeit reibungslos funktioniert.



mmol/L



mg/dL



Vor dem Download der mylife CamAPS FX App überprüfen Sie bitte, ob Ihr Smartphone und das installierte Betriebssystem mit der App kompatibel sind.

- Die Mindestbetriebssystemanforderungen der mylife CamAPS FX App finden Sie unter <https://camdiab.com/de/faq>
- Wenn Sie einen FreeStyle Libre 3 / FreeStyle Libre 3 Plus Sensor verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass Sie ein Smartphone mit NFC (Near Field Communication) besitzen. Eine Liste der Smartphones, die mit dem FreeStyle Libre 3 / FreeStyle Libre 3 Plus Sensor kompatibel sind, finden Sie unter <https://app.freestylelibre.de> oder unter www.diabetescare.abbott/support/manuals.html im Leitfaden "Mobile Device & OS Compatibility".
- Wenn Sie das Dexcom G6 CGM-System verwenden: mylife CamAPS FX ist mit Geräten und Betriebssystemversionen kompatibel, die als kompatibel mit der Dexcom G6 App erklärt wurden. Hier können Sie überprüfen, ob Ihr Smartphone kompatibel ist: <https://www.dexcom.com/compatibility/g6>.

* FreeStyle Libre 3 ist in Deutschland und Österreich verfügbar, FreeStyle Libre 3 Plus ist nur in Deutschland verfügbar (Stand Mai 2025)

Was ist bei der Umstellung von Android auf iOS zu tun?

Wenn Sie von der Android-Version der mylife CamAPS FX App zur iOS-Version wechseln möchten, beachten Sie bitte Folgendes:



Planen Sie Ihren Wechsel sorgfältig

Planen Sie Ihren Wechsel sorgfältig, um sicherzustellen, dass alle wichtigen Informationen gesichert sind, der Übergang so reibungslos wie möglich verläuft und Ihre Therapie nicht unterbrochen wird. Wenn Sie Fragen haben oder Unterstützung benötigen, können Sie sich gerne jederzeit an Ihren lokalen Kundenservice von Ypsomed wenden.



Sichern Sie Ihre Daten

Um Datenverluste zu vermeiden, sollten Sie einen PDF-Bericht Ihrer Vergangenheitsdaten erstellen und speichern, bevor Sie von der Android- zur iOS-App-Version wechseln. Dies hilft Ihnen und Ihrem Diabetesteam, einen klaren Überblick über Ihre Einstellungen, wie Boluskalkulator-Einstellungen, Insulin-Tagesgesamtdosis und persönliches Glukoseziel, zu behalten. Verwenden Sie den erstellten PDF-Bericht zur Einrichtung der Einstellungen in der mylife CamAPS FX App auf Ihrem iPhone.



Neulernen des Algorithmus

Sie können dasselbe mylife CamAPS FX Konto für die Anmeldung in der App auf dem iPhone oder einem Android-Smartphone verwenden. **Der mylife CamAPS FX Algorithmus muss Ihren individuellen Insulinbedarf und die Muster in Ihren Daten jedoch neu erlernen.** Es kann einige Tage dauern, bis die Insulinabgabe wieder vollständig an Ihre Bedürfnisse angepasst ist.



Nachdem Sie die mylife CamAPS FX App auf Ihrem iPhone eingerichtet haben, löschen Sie die mylife YpsoPump in den Bluetooth®-Einstellungen Ihres Android-Smartphones. Löschen Sie die mylife CamAPS FX App von Ihrem Android-Smartphone.

iOS-spezifische Informationen und verfügbare Funktionen

Die mylife CamAPS FX App vereint ihre bewährten Funktionen auch unter iOS und bietet damit eine intelligente und bequeme Möglichkeit für das Typ-1-Diabetes-Management.


- Die mylife CamAPS FX App auf dem iPhone ist mit dem FreeStyle Libre 3, dem FreeStyle Libre 3 Plus und dem Dexcom G6 CGM-Sensor kompatibel.
- Die App bietet verschiedene Optionen für die Fernüberwachung und den Datenaustausch mit Ihrem Diabetesteam oder "Begleitpersonen", wie Familienmitgliedern oder Freunden.
 - Mit der Companion-Funktion können "Begleitpersonen" die Glukosewerte und Insulindaten auf ihrem Android-Smartphone überwachen. Wichtig: Der mylife CamAPS FX Benutzer kann iOS **oder** Android verwenden, **während der Begleitende ein Android-Smartphone benötigt.**
 - Teilen Sie Ihre Glukose- und Insulindaten über Glooko®, um eine nahtlose Zusammenarbeit mit Ihrem Diabetesteam sicherzustellen. Die Integration der mylife Cloud für die iOS-Version folgt.
 - Unter iOS ist keine SMS-"Follower"-Funktion verfügbar.
- Alle anderen Funktionen spiegeln die der Android-Version und ermöglichen so eine zuverlässige, einfach zu bedienende Lösung für das personalisierte Diabetesmanagement.

Kombinationen für die Companion-Funktion (Fernüberwachung)


mylife CamAPS FX Benutzer	Companion (Eltern oder Betreuende)	
Android	Android	✓
iOS	Android	✓
Android	iOS	✗
iOS	iOS	✗

Entdecken Sie, wie mylife CamAPS FX Ihnen helfen kann, die Kontrolle zu übernehmen und das Leben voll auszuschöpfen – jetzt für iPhones!

Bildschirm-Übersicht

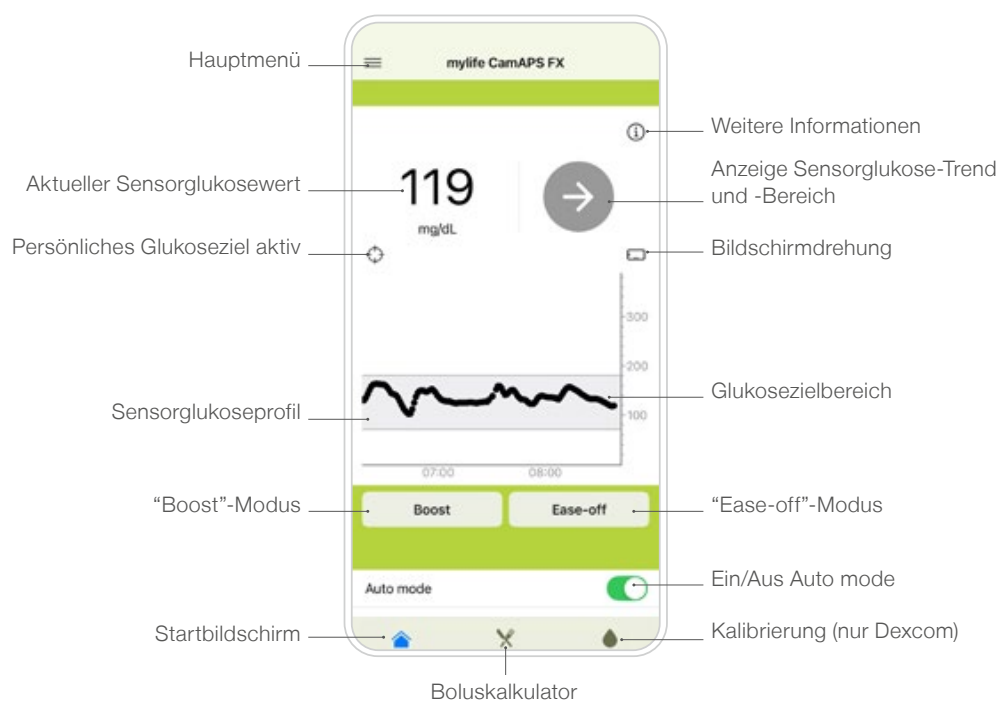

Boluskalkulator der mylife CamAPS FX App auf dem iPhone

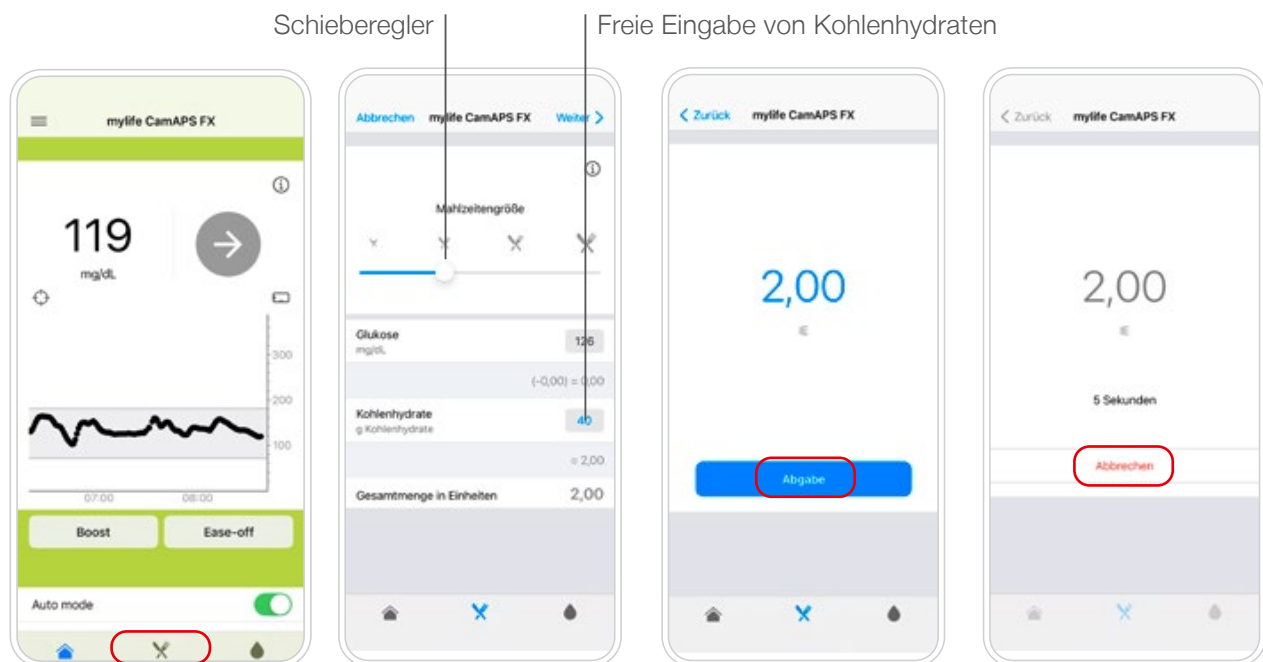

1. Tippen Sie auf das Besteck-Symbol unten in der Mitte des Startbildschirms.
2. Geben Sie die Kohlenhydrate ein. Überprüfen Sie den Bolusvorschlag und tippen Sie auf "Weiter".
3. Tippen Sie auf "Abgabe", um den Bolus-Befehl an die Pumpe zu senden.
4. Nach einem 5-Sekunden-Countdown wird der Bolus abgegeben. Sie können die Bolusgabe stoppen, indem Sie auf "Abbrechen" tippen.



Disclaimer: Die Produktbilder dienen nur zur Veranschaulichung. // mylife und Ypsomed sind eingetragene Marken der Ypsomed AG in verschiedenen Ländern. // CamAPS ist eine eingetragene Marke von CamDiab Ltd. // Dexcom und Dexcom G6 sind registrierte Handelsmarken von Dexcom, Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. // Das Sensorgehäuse, FreeStyle, Libre und verwandte Warenzeichen sind Marken von Abbott und werden mit entsprechender Genehmigung verwendet. // Apple und iPhone sind Marken der Apple Inc. und in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern und Regionen registriert. // Die Bluetooth®-Wortmarke und die Bluetooth®-Logos sind registrierte Handelsmarken der Bluetooth SIG, Inc. und jeder Gebrauch dieser Marken durch die Ypsomed ist unter Lizenz. // Andere Handelsmarken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. // mylife Loop unter iOS: Die beschriebene Innovation ist in ausgewählten Ländern verfügbar und wird demnächst auch in weiteren Ländern erhältlich sein. Die erweiterte Verfügbarkeit ist von einer lokalen behördlichen Genehmigung abhängig.

📄 Sicherheitsinformationen zu den genannten Produkten finden Sie unter mylife-diabetescare.de/sicherheit bzw. mylife-diabetescare.at/sicherheit

Deutschland Ypsomed GmbH // Höchster Straße 70 // 65835 Liederbach //
info@ypsomed.de // www.mylife-diabetescare.de // kostenlose Service-Hotline: 0800 9776633

Österreich Ypsomed GmbH // Am Euro Platz 2 // 1120 Wien //
service@ypsomed.at // www.mylife-diabetescare.at // kostenlose Service-Hotline: 00800 55 00 00 00